

Armstile Lille

Armstile Stor



LEJRINGS- OG STØTTEKILER

COMFORT MASTER LEJRINGSKILER



Armstile Lille



Betæk



Armstile Stor

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	Vægt
	MC 001-8015	71193	Comfort MASTER Armstile	Lille	L 50 x B 20 x H 10 cm	550 g
	MC 001-8016	71191	Betæk til Armstile Lille	Betæk	L 50 x B 20 x H 10 cm	100 g
	MC 001-8017	71683	Comfort MASTER Armstile	Stor	L 89 x B 36 x H 10 cm	700 g

PLACERING AF COMFORT MASTER ARMKILE STOR I SENG



Comfort MASTER Armkile Stor fastspændes til sengehesten og placeres under brugers underarm. Giver derved støtte ved siddende position i seng.

PLACERING AF COMFORT MASTER ARMKILE STOR I KØRESTOL



Comfort MASTER Armkile Stor fastspændes til kørestolen og placeres på kørestolens bord. Derefter lejes brugers underarm på Comfort MASTER Armkile, og derved øges komforten i forbindelse med lejring.

PLACERING AF COMFORT MASTER ARMKILE LILLE I SENG



Comfort MASTER Armkile Lille placeres under brugers underarm og giver derved støtte ved siddende position i seng

PLACERING AF COMFORT MASTER ARMKILE LILLE I KØRESTOL



Comfort MASTER Armkile Lille placeres på kørestolens bord under brugers underarm. Dermed øges komforten i forbindelse med lejring