

Comfort Master

BRUGERVEJLEDNING

Hælkile



Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 001-P610	50127	Comfort MASTER hælkile		L 70 x B 35 x H 15 cm	L	980 g
	MC 001-S610	83357	Betræk til Comfort MASTER hælkile		L 70 x B 35	L	100 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Comfort Master

Hælkile



A. Placering af Hælkile



1A) Brugeren ligger i sengen og har behov for aflastning af sine hæle. Hælkilen placeres således, at underbenene understøttes og hælene dermed er frie fra underlaget.

Vaskeanvisning

Hælkilen kan aftøres med en fugtig klud eller desinficeres med sprit.

Betræk til Hælkilen kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling



ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel.



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Hælkilen består af en lejrings- og støttepude, der leveres i et flammehæmmende åndbart elastisk PU-belagt polyester. Hælkilen er fyldt med flammehæmmende antistatiske flamingokugler, der ikke falder sammen og dermed giver lang levetid.

Anvendelse

Hælkilen kan formes efter brugerens behov og giver unik aflastning samt forebygger tryk.

Hælkilen kan anvendes til aflastning af hæle i liggende stilling og understøttelse af knæ, når sengen ikke har den rette længde til brugeren.

Fordele

- Har indhold af små antistatiske flamingokugler, der ikke falder sammen
- Udligner tryk
- Kan formes efter behov
- Kan desinficeres med sprit
- Lang holdbarhed