

Master GLIDE Transfer Board

BRUGERVEJLEDNING



Master GLIDE Transfer Board Medium



Master GLIDE Transfer Board Large



Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 004-1000	54133	Master GLIDE Transfer Board	Medium	L 90 x B 70 cm Tykkelse: 5 mm	L	2460 g
	MC 004-1010	64537	Master GLIDE Transfer Board	Large	L 155 x B 60 cm Tykkelse: 5 mm	L	3100 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Master GLIDE

Transfer Board



A. Anvendelse af Master GLIDE Transfer Board medium




1A) Vend brugeren om til den ønskede side.



2A) Hvis det er muligt anvend gerne et lagen til vending.



3A) Mens den ene hjælper holder brugeren i sideleje, placerer den anden hjælper Master GLIDE Transfer Board fra hovedet og nedefter til hofteparti. Vær opmærksom på at boardet dækker helt op til brugerens isse, da hovedet ellers vil blive voldsomt roteret under overflytningen.

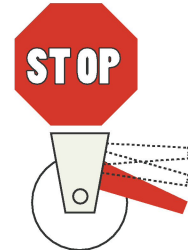

Inden overflytning foretages SKAL hjul på begge lejer låses.



4A) Brugeren rulles nu tilbage og ned på Master GLIDE Transfer Board, således det dækker øverste halvdel af brugerens krop.



5A) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofte- og skulderparti. Ved hjælp af vægtoverføring løfter hjælper let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master GLIDE Transfer Board.



6A) Samtidig trækker hjælper på modsatte side enten i lagnet eller i håndtagene på Master GLIDE Transfer Board ved skulder- og hofteparti. Overflytning påbegyndes.



7A) Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælperes hjælp flytter benene med.



8A) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master GLIDE Transfer Board. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.



9A) Træk nu i det øverste håndtag på Master GLIDE Transfer Board.



10A) Nu er Master GLIDE Transfer Board trukket fri af bruger, og bruger kan nu lægges ned på lejet.

Master GLIDE

Transfer Board



B. Anvendelse af Master GLIDE Transfer Board Large



1B) Vend brugeren om til den ønskede side.



2B) Hvis det er muligt anvend gerne et lagen til vending.



3B) Mens den ene hjælper holder bruger i sideleje placerer den anden hjælper Master GLIDE Transfer Board, således at det dækker fra hoved og nedefter ved brugerens hofte- og benparti.



Inden overflytning foretages **SKAL** hjul på begge lejer låses.



4B) Bruger rulles nu tilbage og ned på Master GLIDE Transfer Board. Sørg for at hoved og det ene eller begge ben er oppe på Master GLIDE Transfer Board.



5B) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofte- og skulderparti. Ved hjælp af vægtoverføring løfter hjælper let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master GLIDE Transfer Board.



6B) Samtidig trækker hjælper på modsatte side enten i lagnet eller i håndtagene på Master GLIDE Transfer Board ved skulder- og hofteparti. Overflytning påbegyndes.



7B) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i håndtagene på Master GLIDE Transfer Board. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Master GLIDE


Vaskeanvisning

Produkterne kan renses med hospitalssprit og hospitalsklorin.

Max. belastning

Medium og Large:

Personvægt:
max 160 kg
Afstand mellem
flyttepunkter:
max 20 cm

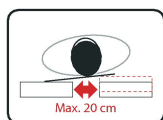

Personvægt: 160 kg

Transfer Board

Produktbeskrivelse

Master GLIDE Transfer Board er fremstillet af en fleksibel plastplade i miljøvenlig polyethylen. Overfladen er specielbehandlet og nedsætter friktionen ved anvendelse. Har grebsvenlige håndtag hele vejen rundt, og hvis ønsket en underside belagt med Safety Walk Anti skrid materiale. Medium dækker brugerens overkrop samt bækkenparti. Large dækker hele brugerens krop.

Anvendelse

Master GLIDE Transfer Board anvendes til liggende overflytninger mellem seng, leje, hvilestol, kørestol der kan lægges ned mm. Master GLIDE Transfer Board bygger bro mellem mindre afstande eller højdeforskelle.

Fordele

- Har unikke glideegenskaber HLF
- Har lav vægt
- Er hygiejnisk og let at rengøre



VIGTIGT

- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Til opbevaring af Master GLIDE Transfer Boards



MC 002-1285
Master RACK Board Holder
H 75 x B 45 x D 9 cm



MC 002-1282
Master RACK
Vægophæng