

# Comfort MASTER BRUGERVEJLEDNING

## Vaskekile



BETRÆK TIL VASKEKILE



## Når mobiliteten forringes...



## ...forbedrer vi livskvaliteten!

| Vare | Art no.     | Hmi no. | Produktbetegnelse                                       | Model  | Størrelse             | *L/B | Vægt   |
|------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------|--------|
|      | MC 001-8019 | 50150   | Comfort MASTER vaskekile                                | Small  | L 70 x H 20 x B 40 cm | L    | 1620 g |
|      | MC 001-8020 | 45939   | Comfort MASTER vaskekile                                | Medium | L 70 x H 30 x B 40 cm | L    | 2340 g |
|      | MC 001-8021 | 50151   | Comfort MASTER vaskekile                                | Large  | L 70 x H 40 x B 40 cm | L    | 3400 g |
|      | MC 001-8098 | 49827   | Betræk til vaskekiler<br>(Passer til alle tre modeller) |        | L 70 x H 30 X B 40 cm | L    | 180 g  |
|      |             |         |                                                         |        |                       |      |        |
|      |             |         |                                                         |        |                       |      |        |

\* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage  
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

# Comfort MASTER Vaskekile



## A. Placering af Comfort MASTER Vaskekile



1A) Brugeren ligger i rygleje på sengen, og der placeres en Slide MASTER Wide mellem brugerens ben, som lægges under det ben, der skal løftes op på vaskekilen.



2A) Brugeren vendes til sideleje, og Vaskekilen placeres under Slide MASTER Wide fra brugerens hofte og nedefter med den brede del ud for brugerens hofte.



3A) Hjælperne kan nu, ved hjælp af Slide MASTER Wide, glide brugerens ben op på Vaskekilen.



4A) Brugers ben er nu placeret på Vaskekilen og Slide MASTER Wide glides væk ved at trække i den underste del, mens hjælperne holder benet på plads på Vaskekilen.



5A) Brugeren ligger nu i sideleje med benet læjret på vaskekilen, og der er derved plads til at udføre personlig pleje.

## Vaskeanvisning

Comfort MASTER Vaskekile kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling



### ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel.



### VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



### ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

## Produktbeskrivelse

Vaskekilen består af en lejrings- og støttepude, der leveres i et flammehæmmende åndbart elastisk PU-belagt polyester. Vaskekilen er fyldt med flammehæmmende antistatiske flamingokugler, der ikke falder sammen og dermed giver lang levetid.

## Anvendelse

Vaskekilen kan formes efter brugerens behov og giver unik aflastning samt forebygger tryk. Vaskekilen støtter under brugerens ben i liggende stilling, og aflaster hjælperne i forbindelse med personlig pleje for nedden. Vaskekilen forebygger således overstræk af hoften samt forebygger løft af tunge ben.

## Fordele

- Har indhold af små antistatiske flamingokugler, der ikke falder sammen
- Udligner tryk
- Kan formes efter behov
- Kan desinficeres med sprit
- Lang holdbarhed